

ANLEITUNG CORONA-SCHNELLTEST

Canea Covid-19 Lutsch- & Speicheltest

Schritt 1: Vorbereitung

Bevor die Kinder oder die Eltern die Probe entnehmen, müssen die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden – Handschuhe sind bei der selbstständigen Entnahme oder der Entnahme durch die Eltern nicht notwendig. Führen Sie den Abstrich an einem möglichst sauberen Platz durch. Für Kinder kann auch ein Spiegel hilfreich sein.

Benötigtes und beiliegendes Material:

- Extraktionsröhrchen (Röhrchen)
- passender Deckel (Tropf-Aufsatz) zum Röhrchen
- Testkassette
- Speichelsammler (mit Schwämmchen)
- Flasche mit Probenaufbereitungslösung
- Wäscheklammer


Schritt 2: Wäscheklammer um das Röhrchen klemmen

Klemmen Sie die Wäscheklammer unten um das Extraktionsröhrchen und stellen Sie dieses auf der Wäscheklammer ab.



Schritt 3: Öffnen der Flasche mit der Flüssigkeit

Drehen Sie den Verschluss der Flasche mit der Probenaufbereitungslösung ab.

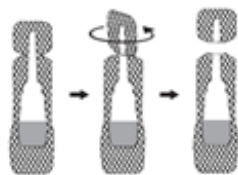

Schritt 4: Flüssigkeit in das Röhrchen füllen

Geben Sie die gesamte Flüssigkeit der Probenaufbereitungslösung (0,2 ml) aus der Flasche in das Extraktionsröhrchen.



Schritt 5: Speichelsammler mit Schwämmchen herausholen

Entnehmen Sie den Speichelsammler aus dem Beutel, indem Sie den Stiel durch die Schweißnaht drücken. **Bitte berühren Sie den Schwamm nicht mit den Fingern.**

Schritt 6: Probe entnehmen

Führen Sie den Schwamm des Speichelsammlers in den Mund ein und bewegen Sie ihn aktiv etwa **1-2 Minuten** in der Innenseite des Mundes und auf der Zunge, um orale Flüssigkeit zu sammeln, bis der Schwamm weich und vollständig gesättigt ist. Der Schwamm ist frei von harten Stellen, wenn er vollständig gesättigt ist.



Schritt 7: Schwämmchen im Röhrchen ausdrücken

Geben Sie den Speichelsammler in das Extraktionsröhrchen, aber **nicht** soweit, dass er die Flüssigkeit berührt. Drücken Sie das Röhrchen auf Höhe des Schwämmchens zusammen, so dass der Speichel im Schwamm des Speichelsammlers in das Extraktionsröhrchen fließt. Entnehmen Sie den Speichelsammler aus dem Extraktionsröhrchen und entsorgen Sie diesen ordnungsgemäß. Sie können ihn zurück in die Verpackung schieben, so bleibt die Tischoberfläche sauber.



Schritt 8: Verschließen des Röhrchens

Verschließen Sie anschließend das Extraktionsröhrchen, indem Sie den Tropf-Aufsatz mit der schmalen Öffnung nach oben auf das Extraktionsröhrchen drücken.



Schritt 9: Vermischen der Flüssigkeit

Halten Sie das Extraktionsröhrchen senkrecht und bewegen Sie es für ca. 5 Sekunden vorsichtig hin und her, damit sich der Speichel gut mit der Probenaufbereitungslösung vermischt.



Schritt 10: Wartezeit


Lassen Sie das **Extraktionsröhrchen für eine Minute stehen** und verwenden Sie es anschließend für den Test.

Nehmen Sie währenddessen die Testkassette aus dem versiegelten Beutel. Legen Sie ihn auf eine flache, saubere und trockene Oberfläche.



Schritt 11: Tropfen auf die Testkassette

Drehen Sie das Extraktionsröhrchen um, so dass der Tropf-Aufsatz nach unten zeigt und geben Sie **2-3 Tropfen** der Testprobe durch Zusammendrücken des Extraktionsröhrchens in die Probenvertiefung.

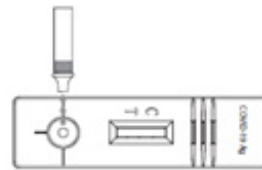

Das Ergebnis wird innerhalb von **10-15 Minuten** angezeigt.



Das Ergebnis wird von den pädagogischen Fachkräften ausgelesen. Daher muss die Testkassette unbedingt beschriftet werden. Eltern von kleineren Kindern, die den Test am Kind durchführen, sollten nach der Durchführung des Tests die Kita wieder verlassen, ohne auf das Ergebnis zu warten.

Auswertung des Tests:

Auf der Testkassette befinden sich zwei Markierungen, an denen nach durchgeführtem Test Striche sichtbar werden können. Der Bereich C liefert die Qualitätskontrolllinie, der Bereich T die Nachweislinie.

(C=Qualitätskontrolllinie, T=Nachweislinie)



Strich nur bei C

Test ist negativ

Achtung: Kein sicherer Ausschluss einer Infektion



Negativ



Striche bei C&T

Test ist positiv

Weiteres Vorgehen s. FAQs



Positiv



Strich nur bei T

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen



Ungültig



Keine Striche

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen

Alle benutzten Testutensilien geben Sie im Anschluss bitte in eine Plastiktüte (wasserundurchlässig) und entsorgen diese. Reinigen Sie die Wäscheklammer mit Seife unter fließendem Wasser. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, lüften Sie den Raum und säubern Sie die Unterlage.

Für Rückfragen zur Durchführung der Corona-Schnelltests wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitung.