

ANLEITUNG CORONA-SCHNELLTEST

Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,
Ltd. (SARS-CoV-2-Antigen Testkid (LFIA))

Schritt 1: Vorbereitung

Bevor Sie die Probe entnehmen, müssen Sie die Hände **gründlich waschen** oder desinfizieren – Handschuhe sind bei der selbstständigen Entnahme nicht notwendig. Führen Sie den Abstrich an einem möglichst sauberen Platz durch. Bei der selbstständigen Entnahme kann auch ein Spiegel hilfreich sein.

Benötigtes Material:

- Testkassette
- steriler Tupper
- Probeentnahmeröhrchen mit individuellem Lysispuffer
- Tropfer (Deckel zum Röhrchen)
- Wäscheklammer

Schritt 2: Probeentnahmeröhrchen

Öffnen Sie das Probeentnahmeröhrchen mit individuellem Lysispuffer.

Klemmen Sie die Wäscheklammer unten um das Reagenzglas und stellen Sie das Reagenzglas auf der Wäscheklammer ab.



Schritt 3: Tupper entnehmen

Öffnen Sie die Verpackung des Stäbchens an der Stelle, an der der Pfeil abgebildet ist und nehmen Sie das Stäbchen am Griff heraus. Dabei den Tupperkopf nicht berühren.



Schritt 5: Tupper im Röhrchen schwenken

Führen Sie den Tupper in das Röhrchen, bis der Tupperkopf den Boden des Reagenzglases berührt. Drehen Sie den Tupper nun 10 Mal und berühren Sie innerhalb der Pufferlösung die Röhrchenwand.



Schritt 4: Abstrich entnehmen

Entnahme im vorderen Nasenbereich:
Führen Sie den Tupper mit dem größeren Kopf (Wattebausch) bis Sie einen leichten Widerstand spüren, in ein Nasenloch bis zu 2,5 cm tief ein, wo sich das meiste Sekret befindet. Drehen und schieben Sie den Tupper dann 5 Mal vorsichtig entlang der inneren Nasenwand, um Sekret auf den Tupper zu bringen. Mit dem selben Tupper wiederholen Sie den Vorgang im zweiten Nasenloch.

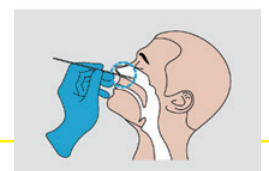
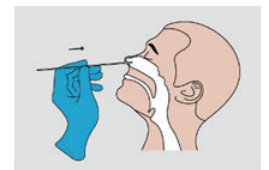


Schritt 6: Tupfer ausdrücken

Drücken Sie anschließend die Röhrenwand von außen 5 Mal um den Tupferkopf zusammen, um die Probe vollständig in der Flüssigkeit zu lösen.

Heben Sie den Tupfer anschließend im Röhren wieder etwas hoch und drücken Sie das Röhren oberhalb der Flüssigkeit erneut auf Höhe des Tupferkopfes zusammen, um den Tupfer möglichst vollständig auszudrücken. Ziehen Sie den Tupfer wieder aus dem Röhren und stecken Sie ihn direkt in einen wasserundurchlässigen Müllbeutel oder kopfüber zurück in die Verpackung.

Bedecken Sie anschließend das Probeentnahmeröhrchen mit dem Tropfer und drücken Sie diesen fest auf das Röhren, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, es ist kein Einfädeln oder Verdrehen nötig.

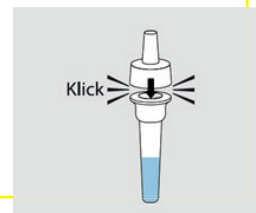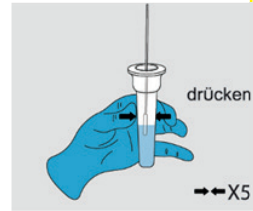


Schritt 7: Öffnen der Testkassette

Reißen Sie den Aluminiumfolienbeutel der Testkassette auf. Nehmen Sie die Testkassette heraus und legen Sie sie auf eine saubere flache Oberfläche.

Schritt 8: Flüssigkeit auf Testkassette geben

Drehen Sie das Röhren über dem Probenloch der Testkarte auf den Kopf und drücken Sie das Röhren zusammen, so dass **genau vier** Tropfen der Probenlösung in das Probenloch der Testkassette fallen.

Beobachten Sie das Ergebnis der Testkarte **15 Minuten lang und bewegen Sie die Testkarte nicht**. Nach dieser Wartezeit wird das Testergebnis angezeigt. Nach Ablauf von 20 Minuten kann sich das angezeigte Ergebnis verändern. Damit wird der Test ungültig.

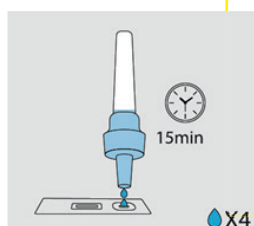

Auswertung des Tests:

Auf der Testkassette befinden sich zwei Markierungen, an denen nach durchgeführtem Test Striche sichtbar werden können. Der Bereich C liefert die Qualitätskontrolllinie, der Bereich T die Nachweislinie.

(C=Qualitätskontrolllinie, T=Nachweislinie)



Strich nur bei C

Test ist negativ

Achtung: Kein sicherer Ausschluss einer Infektion



Negativ



Striche bei C&T

Test ist positiv

weiter zu „Verfahren bei positivem Schnelltest“



Positiv



Strich nur bei T

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen



Ungültig



Keine Striche

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen

Alle benutzten Testutensilien geben Sie im Anschluss bitte in eine gesonderte Plastiktüte (wasserundurchlässig) und entsorgen diese. Reinigen Sie die Wäscheklammer mit Seife unter fließendem Wasser. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, lüften Sie den Raum und säubern Sie die Unterlage.

Für Rückfragen zur Durchführung der Corona-Schnelltests wenden Sie sich bitte an die **Corona-Schnelltest Hotline unter 0731 161 2138**.